

Serviceanvisning för 3-18 cykel



Innehåll

1	Rutiner för rengöring	3
2	Checklista vid leverans	4
3	Rutiner för underhåll	5
4	Rutiner för rekonditionering	6
5	Broschyr	7
6	Reservedelslista	8
7	Tillbehör	9
8	Utfört service	10


Information om producent och leverantör

Producent

Schuchmann Vertrieb und Handel GmbH
Dütestrasse 3
49205 Hasbergen
Tfn: 0 54 05/909-0
Fax: 0 54 05/909-109
E-post: mail@schuchmann-reha.de
Internett: www.schuchmann-reha.de

Leverantör


Minicrosser AB
Bultgatan 28
442 40 Kungälv
Tfn: + 46 (0)304-348 80
Fax: + 46 (0) 304-348 88
E-post: info@minicrosser.se
Internett: www.minicrosser.se

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	RUTIN FÖR :	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
1	RENGÖRING AV 3-18 cykel		
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR


	Produkt	<i>UTFÖRT AV:</i>	<i>UTFÖRT DATUM:</i>
1	Cykeln rengörs med mildt såpabaserat rengöringsmedel.		
2	Cykeln kan tvättas i 60° i max 6 minuter, högtryckstvätt.		
3	Torka av produkten efter rengöring		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
13			
14	Smörj rörliga delar som pedaler och kedja		

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	GENERELL CHECKLISTA VID UTLEVERANS AV:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
2	3-18 cykel	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR


	Produkt	<i>UTFÖRT AV:</i>	<i>UTFÖRT DATO:</i>
1	Är embalaget skadat?		
2	Kontrollera i så fall att alla delar är intakta		
3	Kontrollera att hjulen är oskadda		
4	Kontrollera att ramen inte är skev eller har lackskador		
5	Kontrollera följesedlar så att samtliga delar är levererade		
6	Kontrollera att tillbehör är korrekt monterade		
7			
8			
9			
10			
11			
13			
14			
15			
16			
17			
18	Kontakta speditör och leverantör vid eventuella skador eller fel		

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	GENERELL CHECKLISTA FÖR PERIODISKT UNDERHÅLL:	GILTIGT FRÅN:	UTF. AV:
3	3-18 cykel	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

	Produkt	<i>UTFÖRT AV:</i>	<i>UTFÖRT DATUM:</i>
1	Kontrollera skruvar och muttrar och dra åt vid behov		
2	Kontrollera att hjulen sitter som de ska, justera vid behov		
3	Kontrollera att styret och styrstången inte har några skador		
4	Kontrollera bromsfunktionen, justera vid behov		
5	Kontrollera lufttrycket i däcken. Ta hänsyn till maximalt lufttryck, vilket finns angivet på däcket		
6	Kontrollera däckens mönsterdjup		
7	Kontrollera ljus och ringklocka		
8	Kontrollera att styrets handtag sitter fast och inte är slitna		
9			
10			
11			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEKS NR:	GENERELL CHECKLISTA VID REKONDITIONERING AV:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
4	3-18 cykel	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

	Produkt	<i>UTFÖRT AV:</i>	<i>UTFÖRT DATUM:</i>
1	Kontrollera kedjan och kedjespänningen, justera, rengör och olja vid behov		
2	Kontrollera bakhjulen och justera vid behov		
3	Kontrollera pedallagren, lageravstånd och justera (byt ut) vid behov		
4	Kontrollera navkopplingen och justera vid behov		
5	Kontrollera bromsarnas funktion och justera vid behov. Om bromsarna inte fungerar tillfredställande måste vjrar, bromsbyglar och bromsbelägg kontrolleras, justeras och vid behov bytas ut.		
6	Kontrollera styrets lager, smörj vid behov		
7	Kontrollera vajrar. Krökta eller fastklämda vajrar ska bytas ut.		
8	Kontrollera fälgarna		
9	Kontrollera spänningen i ekrarna och justera vid behov		
10	Kontrollera däckens mönsterdjup		
11	Kontrollera ljus och ringklocka		
13	Kontrollera bakhjulsnavet och smörj vid behov		
14	Kontrollera att inte ramen eller gaffeln har några skador och byt ut ev defekta delar		
15			
16			
17			
18			

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDX NR:	BROSCHYR:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
5	3-18 cykle	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

POS	BESKRIVNING	UTF. DATUM	SIGN.
1	Bruksanvisning för 3-18 cykel		
2	Serviceanvisning för 3-18 cykel		


LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90**medema**

INDEX NR:	Reservdelar:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
6	3-18 cykle	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

Reservdelar 3-18 cyklar:	
8090069	Nav 7 växlar m tillbehör t 3-18
3794011	Axel 3-18 24-26 tum
3791011	Axel 3-18 12 tum
3792011	Axel 3-18 16 tum
3793011	Axel 3-18 20 tum
3790014	Bakljus 3-18 16-26 tum
3790031	Blybatteri 24V 3-18
1721014	Bromskloss 3-18
8090082	Däck 3-18 12 tum
8090083	Däck 3-18 16 tum
8090084	Däck 3-18 20 tum
8090085	Däck 3-18 24 tum
8090086	Däck 3-18 26 tum
3791012	Kåpa 3-18 kort f fast nav
3792012	Kåpa 3-18 långt f nav m broms
8090039	Hjul 3-18 12 tum bak hö
8090045	Hjul 3-18 16 tum bak hö
8090051	Hjul 3-18 20 tum bak hö
8090057	Hjul 3-18 24 tum bak hö
8090095	Hjul 3-18 26 tum bak hö
3790015	Dynamo 3-18 24-26 tum
3790016	Reflex 3-18 t eker
3790032	Fartkontroll 3-18 av o på kpl
3790034	Fäste f fartkontroll 3-18
3792013	Fäste f skärm 3-18 16 tum bak
3793013	Fäste f skärm 3-18 20 tum bak
3794013	Fäste f skärm 3-18 24 tum bak
3795013	Fäste f skärm 3-18 26 tum bak
3791023	Fäste f skärm 3-18 12 tum fram
3792023	Fäste f skärm 3-18 16 tum fram
3793023	Fäste f skärm 3-18 20 tum fram
3794023	Fäste f skärm 3-18 24 tum fram
3795023	Fäste f skärm 3-18 26 tum fram
3790004	Fäste kedjespännare hjul 3-18
3791004	Framgaffel 3-18 12 tum
3792004	Framgaffel 3-18 16 tum
3793004	Framgaffel 3-18 20 tum
3795004	Framgaffel 3-18 24 tum
3794004	Framgaffel 3-18 26 tum
8090108	Bromsvajer 3-18 12 tum
8091108	Bromsvajer 3-18 16 tum
8092108	Bromsvajer 3-18 20 tum
8093108	Bromsvajer 3-18 24 tum
8094108	Bromsvajer 3-18 26 tum


3791027	Grep 12 tum o 16 tum 3-18
3792027	Grep 20 tum t 26 tum 3-18
8090038	Hjul 3-18 12 tum bak vä
8090044	Hjul 3-18 16 tum bak vä
8090050	Hjul 3-18 20 tum bak vä
8090056	Hjul 3-18 24 tum bak vä
8090094	Hjul 3-18 26 tum bak vä
8090040	Hjul 3-18 12 tum fram
8090043	Hjul 3-18 16 tum fram
8090049	Hjul 3-18 20 tum fram
8090055	Hjul 3-18 24 tum fram
3754007	Hjul 3-18 24 tum fram inkl hjälpmotor i nav
8090093	Hjul 3-18 26 tum fram
3750004	Hållare f blybatteri 3-18 24 V m remmar
8090028	Handbroms m park broms o kabel 3-18
3790026	Handtag 3-18 t ledsagarstyrning
3790029	Kabel f styrning 3-18 längd 1950 mm
3751004	Kedja 3-18 12 tum
3752004	Kedja 3-18 16 tum
3753004	Kedja 3-18 20 tum
3754004	Kedja 3-18 24 tum
3755004	Kedja 3-18 26 tum
3791022	Kedjeskydd 3-18 12 tum
3792022	Kedjeskydd 3-18 16 tum
3793022	Kedjeskydd 3-18 20 tum
3794022	Kedjeskydd 3-18 24 tum
3795022	Kedjeskydd 3-18 26 tum
3790010	Hjul kedjespännare 3-18
3791010	Klämma 3-18 25,4 mm
3792010	Klämma 3-18 28,6 mm
3791007	Vevarm 3-18 12 tum
3792007	Vevarm 3-18 16 tum
3793007	Vevarm 3-18 20 tum
3794007	Vevarm 3-18 24 tum
3795007	Vevarm 3-18 26 tum
3791025	Korg 3-18 12 tum
3792025	Korg 3-18 16-26 tum
3790033	Laddare 3-18 230/24V
3790017	Lager 3-18
3790013	Lykta 3-18 24-26 tum fram
3701020	Ljusset 3-18 16-20 tum kpl fram (LED)
8090070	Nav m broms 3-18
3790027	Navfäste 3-18 hö
3790028	Navfäste 3-18 vä
3790003	Överföring 3-18 12 tum o 26 tum
3750002	Överföringskedja 3-18
3791006-H	Pedal 3-18 12 tum hö
3791006-V	Pedal 3-18 12 tum vä
3792006-H	Pedal 3-18 16-20 tum hö
3792006-V	Pedal 3-18 16-20 tum vä
3793006-H	Pedal 3-18 24-26 tum hö
3793006-V	Pedal 3-18 24-26 tum vä
3791002	Ram 3-18 12 tum

3792002	Ram 3-18 16 tum
3793002	Ram 3-18 20 tum
3794002	Ram 3-18 24 tum
3795002	Ram 3-18 26 tum
3791003	Ramdel 3-18 12 tum bak
3792003	Ramdel 3-18 16 tum bak
3793003	Ramdel 3-18 20 tum bak
3794003	Ramdel 3-18 24-26 tum bak
3792026	Reflex 3-18 16-26 tum hö
3790011	Reflex 3-18 12-26 tum fram
3791026	Reflex 3-18 16-20 tum t skärm
3790001	Ringklocka 3-18
8290105	Skruv sekskant 3-18 M 12 x 1,25 x 70
8291015	Mutter sekskant 3-18M12 x 1,25
3791024	Sadel 3-18 12-16 tum
3792024	Sadel 3-18 20-24 tum
3793024	Sadel 3-18 26 tum
3793010	Sadelklämma 3-18 34,9 mm
3751003	Skärmset 3-18 12 tum (set om 3 st)
3752003	Skärmset 3-18 16 tum (set om 3 st)
3753003	Skärmset 3-18 20 tum (set om 3 st)
3754004	Skärmset 3-18 24 tum (set om 3 st)
3755005	Skärmset 3-18 26 tum (set om 3 st)
3790007	Påskjutningshandtag 3-18 nedre del
3790008	Påskjutningshandtag 3-18 övre del
3790006	Fäste t påskjutningshandtag 3-18
8010	Slang 3-18 12 tum
8035	Slang 3-18 16 tum
8065	Slang 3-18 20 tum
8096	Slang 3-18 24 tum
8116	Slang 3-18 26 tum
3791009	Styre 3-18 12 tum
3792009	Styre 3-18 16-26 tum
3791005	Styrsats 3-18 12 tum
3792005	Styrsats 3-18 16-26 tum
3791008	Styrstång 3-18 12 tum
3792008	Styrstång 16-26 tum
3750003	Styrbox 3-18 24 V kpl
3790019	Kuggjul 3-18 nav21 T
3790012	Tramplager 3-18
3790030	Trampsensor 3-18 kpl
3791014	T-stag 3-18 12-16 tum
3792014	T-stag 3-18 20-26 tum
3790002	V-Broms 3-18

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEXNR:	TILLBEHÖR:	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
	3-18 cykel	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

3-18 har som standard:	
Aluminiumram	
Låg instigningshöjd	
Lätt att trampa	
Förberedd för ledsagarhandtag	
Fast nav eller pedalbroms	
Ringklocka	
Skärmar (inte 12")	
Ljus (inte 12")	
Reflexer	
T-stång under sadel, steglöst justerbar	
Korg	
Pump	
Parkeringsbroms	
Kjedjesträckare	
Standard tillbehör	Art.nr
Cykel 3-18 12 tum fast nav m handbroms	37100FAST
Cykel 3-18 16 tum fast nav m handbroms	37200FAST
Cykel 3-18 20 tum fast nav m handbroms	37300FAST
Cykel 3-18 24 tum fast nav m handbroms	37400FAST
Cykel 3-18 26 tum fast nav m handbroms	37500FAST
Cykel 3-18 12 tum m pedalbroms	37100PED
Cykel 3-18 16 tum m pedalbroms	37200PED
Cykel 3-18 20 tum m pedalbroms	37300PED
Cykel 3-18 24 tum m pedalbroms	37400PED
Cykel 3-18 26 tum m pedalbroms	37500PED
Cykel 3-18 12 tum m pedalbroms o 7 växlar	37100PED7
Cykel 3-18 16 tum m pedalbroms o 7 växlar	37200PED7
Cykel 3-18 20 tum m pedalbroms o 7 växlar	37300PED7
Cykel 3-18 24 tum m pedalbroms o 7 växlar	37400PED7
Cykel 3-18 26 tum m pedalbroms o 7 växlar	37500PED7
Cykel 3-18 16 tum m pedalbroms / 7 växlar o hjälpmotor	37200PED7-M
Cykel 3-18 20 tum m pedalbroms / 7 växlar o hjälpmotor	37300PED7-M
Cykel 3-18 24 tum m pedalbroms / 7 växlar o hjälpmotor	37400PED7-M
Cykel 3-18 26 tum m pedalbroms / 7 växlar o hjälpmotor	37500PED7-M

Produktbenämning	Art.nr
Abduktionssadel 3-18 12-16 tum	124369
Abduktionssadel 3-18 20-26 tum	124370
Balanspedaler 3-18 m fotrem	117184
Banansadel 3-18	124362
Fotplatta 3-18 24-26 tum m vadväst hö	3704018-H
Fotplatta 3-18 12 tum m vadväst hö	3701018-H
Fotplatta 3-18 16-20 tum m vadväst hö	3702018-H
Fotplatta 3-18 24-26 tum m vadväst vä	3704018-V
Fotplatta 3-18 12 tum m vadväst vä	3701018-V
Fotplatta 3-18 16-20 tum m vadväst vä	3702018-V
Fotplatta 3-18 12 tum m lod och rem hö	3701017-H
Fotplatta 3-18 16-20 tum m lod och rem hö	3702017-H
Fotplatta 3-18 24-26 tum m lod och rem hö	3704017-H
Fotplatta 3-18 12 tum m lod och rem vä	3701017-V
Fotplatta 3-18 16-20 tum m lod och rem vä	3704017-V
Fotplatta 3-18 24-26 tum m lod och rem vä	3702017-V

LEVERANTÖR: Medema Norge AS. TLF: 815 32 400 FAX: 67 06 49 90			
INDEX NR:	UTFÖRT SERVICE PÅ	GILTIG FRÅN:	UTF. AV:
8	3-18 cykel	01.03.04	DIF
HJÄLPMEDELSNR:	INDIVIDNR.	MODELL	SERIENR

POS	BESKRIVNING	UTF. DATUM	SIGN.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			