



Cleo Rekonditionering / underhåll

Ver. 2016-06-08

CLEO är CE-märkt. Härmed garanterar tillverkaren att denna medicinska produkt uppfyller kraven i EU-riktlinje 93/42/EEC. Före varje användningstillfälle ska rullstolens, och framför allt bromsarnas, funktion kontrolleras. Säkerhetsmuttrar ska bara användas en gång. När dessa muttrar har lossats flera gånger måste de bytas ut.

Cleo	Typ	Datum
------	-----	-------

	Kontrollera följande	Justering/ Anmärkning
1	Funktionskontroll av bromsar	
2	Kontrollera benstöd, eventuell låsfunktion, fällning, justering	
3	Kontroll av att fotplattan sitter fast	
4	Funktionskontroll av tippskyddet	
5	Kontroll av att drivhjulen sitter ordentligt (hjulaxel) Kontroll av drivhjulets ekerspänning Rengöring av hjulen, avlägsna hår exempelvis.	
6	Kontrollera att quick release-låset låser korrekt	
7	Kontrollera lufttryck.	
8	Kontrollera att rullstolen går rakt	
9	Inspektion av ramen med hänsyn till skada, vid behov utbyte av defekta delar. Kontroll av slitagedelar som hjul och lager	
10	Inspektion av rörliga delar, vid instabilitet eller för mycket rörlighet dra åt alla skruvar.	
11	Låt inte smuts torka in, utan rengör med vatten och en mjuk trasa eller svamp. Spola ej med högtryckstvätt direkt på lager. Spola ej med högtryckstvätt från nära håll på klädseln	
12	Delar som har skevhet, sprickor, rostskador eller deformationer skall bytas ut. Delar som är slitna och har nedsatt funktion bör bytas ut. Mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg	
13	Kontrollera att bruksanvisning och märkning finns	
14	Vid behov eller vid återanvändning, behandla överdrag/klädsel med ett desinfektionsmedel för ytor.	
15	Förvara hjälpmedlet i ett torrt utrymme med rumstemperatur, särskilt under vintern.	
16	Regelbundet underhåll utfört av aktiverad verksamhet bevarar produktens livslängd.	

Underhåll - rengöringsanvisning finns även i produktens bruksanvisning.



Cleo Skötselråd

- Alla ram- och plastdelar ska enbart rengöras med mildt desinfektionsmedel av den typ som kan köpas i vanlig handel.
- Stoppade delar kan tvättas i 60 °C. I tvättmaskin får de dock enbart tvättas i tvättpåse eller i dynöverdraget. Använd desinfektionsmedel av den typ som kan köpas i vanlig handel.
- Cleo kan tvättas i diskdesinfektor 60° i 10 minuter.
- Tvättanvisning står angivet på textilier och dessa ska följas.
- Oftast räcker det att torka av med en fuktig trasa.
- Får ej användas i saltvatten.
- Undvik vid behov att sand eller annan smuts kan angripa hjullagren.
- När rullstolen blir våt rekommenderar vi att du torkar den torr.
- Mellan länkhjulsgaffel och länkhjul samlas ofta hår eller smuts som med tiden kan göra att länkhjulen svänger sämre. Demontera svänghjulet och rengör gaffel och länkhjul grundligt med ett mildt rengöringsmedel.
- Drivhjulen kan demonteras via hjulaxeln. För att systemet ska fortsätta fungera ska du se till att ingen smuts sätter sig på hjulaxeln eller på hjulaxelfästet. Olja in hjulaxeln lätt med jämna mellanrum med en hartsfri symaskinsolja.