



medemagrupper

# Malte / Malte Outdoor Rekonditionering / underhåll

Ver. 2017-02-15

	Beskrivning	Utfört datum	Sign
1	Alla ramdelar och ytor kan rengöras med svamp eller fuktig trasa tillsammans med vanliga, antibakteriella rengöringsmedel. Använd inga aggressiva rengöringsmedel, till exempel lösningsmedel, ej heller hårda borstar eller liknande.		
2	Rollatorn kan rengöras i en autoklav/desinfektor (60° C, 7 minuter)		
3	Reparera eventuella lackskador och sprickor		
4	Kontrollera/justera bromsar		
5	Kontrollera hjul och däck		
6	Smörj alla rörliga delar		
7	Kontrollera alla skruvar och dra åt vid behov		
8	Inspektera rollatorn och kontrollera om det saknas delar eller om något inte fungerar som det ska		
9	Se till att produktens bruksanvisning finns		
10	<b>Tillbehör:</b> Kontrollera slitage, funktion och montering. Vi rekommenderar att alla tillbehör monteras enligt våra monteringsanvisningar		
	Om ni behöver beställa reservdelar vänder ni er till Minicrosser AB och uppger rollatorns serienummer.		
	<b>Utfört av:</b>		
	<b>Datum:</b>		

För ytterligare underhåll och service se produktens bruksanvisning & Servicemanual.