

# Rekonditionering Hip

Minicrosser AB  
Medemagruppen



Ver. 2018-03-29

Hip	Typ	Datum
-----	-----	-------

	Kontrollera följande	Justering/ Anmärkning
1	Kontrollera samtliga skruvar och bultar. Kontrollera att hjulen är i korrekt position och dra eventuellt åt lösa delar.	
2	Inspektion av korrekt montering av kramstöden i aluminiumprofilen.	
3	Inspektion av kramstödens låsfunktion.	
4	Inspektion av bromsfunktionen. I de fall bromsfunktionen inte fungerar riktigt måste hjulen bytas ut.	
5	Rengöring av hjulen, avlägsna hår exempelvis.	
6	Kontrollera vinkeljustering och gasfjäder. I de fall gasfjädern inte kan låsas i önskat läge måste den bytas ut.	
7	Inspektion av ramen med hänsyn till skada, vid behov utbyte av defekta delar.	
8	Inspektion av rörliga delar, vid instabilitet eller för mycket rörlighet dra åt alla skruvar.	
9	Låt inte smuts torka in, utan rengör med vatten och en mjuk trasa eller svamp. Använd inte högtryckstvätt då detta kommer skada lager, lack och dekor.	
10	Använd inte någon form av aggressivt rengöringsmedel.	
11	Lacksador bör åtgärdas omedelbart, detta för att skydd mot korrosion annars inte kan säkerställas.	
12	Förvara ståstödet i ett torrt utrymme med rumstemperatur, särskilt under vintern.	
13	Vid behov eller vid återanvändning, behandla överdrag/klädsel med ett desinfektionsmedel för ytor.	
14	Ståstödet kan tvättas i desinfektor, 60° i 4 minuter.	
15	Tvättanvisning klädsel. Normal maskintvätt 40° rekommenderas, vid behov 60° Undvik strykning och ångbehandling. Undvik torkning i torktumlare. Tål ej kemtvätt.	
16	Regelbundet underhåll utfört av aktiverad verksamhet bevarar produktens livslängd.	
17	Hip ståstöd kan recirkuleras och användas av flera personer. Innan ståstödet används på nytt skall det rengöras och decinfeceras enligt anvisningar, samt godkännas av en ackrediterad verksamhet efter en total översyn.	

Underhåll - rengöringsanvisning finns även i produktens bruksanvisning.