

Rekonditionering Mini Crosser X



Minicrosser AB
Medemagruppern

Ver. 2024-09-20

Serienummer	Typ	Datum	Driftid
	KONTROLLERA	OK?	JUSTERING / ANMÄRKNING
1	Helhetsintryck		
2	Blinkers fram/bak		
3	Bromsljus		
4	Belysning fram/bak		
5	Signal		
6	Fram/back		
7	Handbromsvajer		
8	Frikoppling		
9	Däcktryck 2,8 bar		
10	Körning framåt hög/låg hastighet		
11	Bromssträcka		
12	Svets på sittrörs kontroll		
13	Kabelstammar, kontakter		
14	Plastkåpor		
15	Testa att det ej går att köra när laddkontakt sitter i		
16	Testa att det ej går att köra vid frikoppling		
17	Laddning: V A		
18	Batterier, kapacitet: Ah i %		
19	Generell säkerhet, kontroll för evt tipprisk vid tex. eftermontering		
20	Tecken efter varmgång / överbelastningar på kopplingar, elektronik, batteripoler , kablar etc		
21	Mini Crossern ska rengöras med lätt fuktad trasa. Eftertorka med sämskskinn. Skärmarna ska torkas av och behandlas med bilvax. Vid behov som te.x smittrisk kan produkten torkas av med sprit.		
22	OBS! Använd aldrig högtrycksvätt eller vattenslang eftersom det kan orsaka skador på elektroniken.		
23	OBS! Använd aldrig upplösningsmedel som Terpentin, Cellulosa förtunnare eller liknande till att rengöra scootern. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).		
	Förbättringsfärg: Bättringslack Minicrosser		
För ytterligare serviceöversikt se produktens Bruksanvisning / Servicemanual.		Rekonditionering utförd av:	