

# Rekonditionering Hip 170

Minicrosser AB  
Medemagruppen

Ver. 2018-03-29



Hip	Typ	Datum

	Kontrollera följande	Justering/ Anmärkning
1	Kontrollera samtliga skruvar och bultar. Kontrollera att hjulen är i korrekt position och dra eventuellt åt lösa delar.	
2	Inspektion av bromsfunktionen. I de fall bromsfunktionen inte fungerar riktigt måste hjulen bytas ut.	
3	Rengöring av hjulen, avlägsna hår exempelvis.	
4	Inspektion av ramen med hänsyn till skada, vid behov utbyte av defekta delar.	
5	Inspektion av rörliga delar, vid instabilitet eller för mycket rörlighet dra åt alla skruvar.	
6	Låt inte smuts torka in, utan rengör med vatten och en mjuk trasa eller svamp. Använd inte högtryckstvätt då detta kommer skada lager, lack och dekor.	
7	Använd inte någon form av aggressivt rengöringsmedel.	
8	Lacksador bör åtgärdas omedelbart, detta för att skydd mot korrosion annars inte kan säkerställas.	
9	Förvara ståstödet i ett torrt utrymme med rumstemperatur, särskilt under vintern.	
10	Ståstödet kan tvättas i desinfektor, 60° i 4 minuter.	
11	Regelbundet underhåll utfört av aktiverad verksamhet bevarar produktens livslängd.	
12	Hip ståstöd kan recirkuleras och användas av flera personer. Innan ståstödet används på nytt skall det rengöras och decinfeceras enligt anvisningar, samt godkännas av en ackrediterad verksamhet efter en total översyn.	

Underhåll - rengöringsanvisning finns även i produktens bruksanvisning.