


Anvisning.

Följande arbetssteg beskriver avkortningen av **benstödsrören** hos **mädita**, **mädita-fun**. och **so ie**.. Det spelar ingen roll om sitsen är utrustad med en standardsittdyna eller en anatomiskt utformad sittdyna.

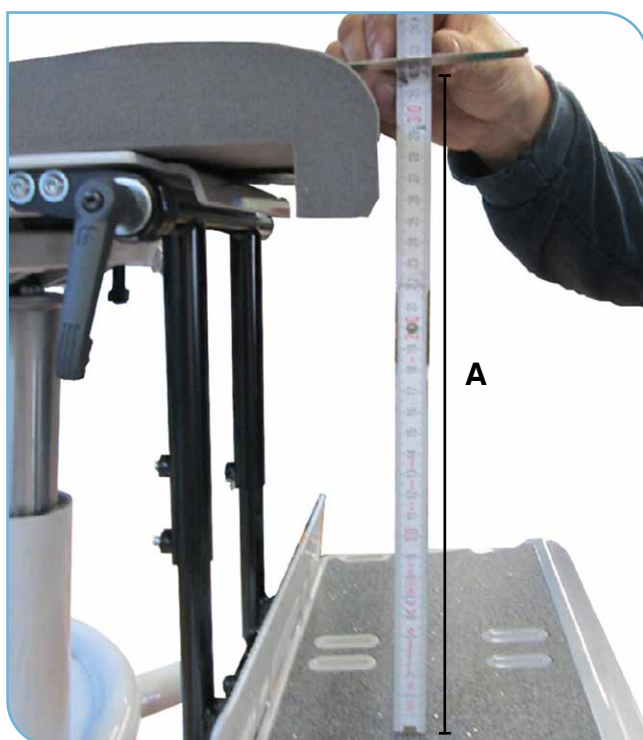

Som standard kan man ställa in **benstödsröret** till underbenslängden (**A**) från sittdyna till **footplatta**

vid stl 0	mellan	20 och 25 cm,
vid stl 1	mellan	24 och 32 cm,
vid stl 1b	mellan	32 och 46 cm,
vid stl 2	mellan	32 och 49 cm

Om **footplattan** skall ställas in till en kortare underbenslängd måste rören kortas av. Ta storlekstabellen här intill till hjälp.

Steg 1

När rören har demonterats måste innerröret märkas upp enligt storlekstabellen.

Steg 2

När man har märkt upp det avstånd som skall kortas, sågar man på det uppmärkta stället, helst i 90° vinkel. Använd en järnsåg till detta.

Storlekstabell:

	Avkortning med
Stl 0	3 cm
Stl 1	4 cm
Stl 1b	4 cm
Stl 2	6 cm

Steg 3


När man har kortat av rören måste man avgrada sågkanterna så att inga personsador uppstår p.g.a. vasskantade rör. Använd entingen en vanlig avgradare, eller en järnfil.

Steg 4

Sätt ihop inner- och yterröret igen, och montera fotbänken på önskad höjd.

Om den enkla avkortningen inte räcker till för att nå upp till det önskade underbensmåt-
tet kan rören kapas ytterligare. Man måste då ovillkorligen korta av inrerören igen och
denna gång även ytterrören. De värden som skall kortas av återfinns i storlekstabellen
på sidan 17. Följ sedan steg 5 - 8.

**En avkortning till den minsta längden är möjlig men rekommenderas inte, eftersom
fotstödsrören nu låses fast via två i stället för fyra fixeringskruvar.**

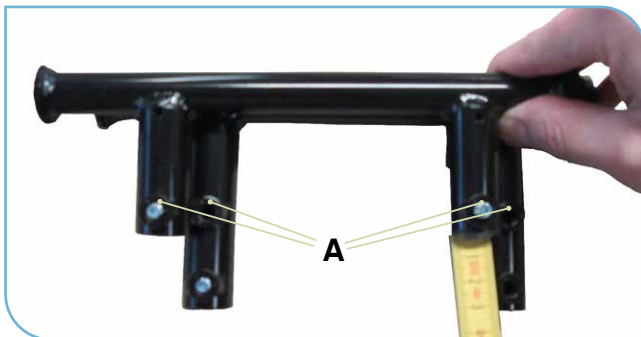

Steg 5

När rören har demonterats måste man
märka upp avkortningsmättet för ak-
tuell grundmodellsstorlek för **madita.**
madita-fun. & **sofie.** på alla fyra rö-
ren. Det måste ovillkorligen beaktas
att markeringarna på ytterröret ligger
nedanför den övre styrningen för fixe-
ringskruvarna (A).

Steg 6

När man har märkt upp det avstånd som skall kortas sågar man på de uppmärkta stäl-
lena, helst i 90° vinkel till varje rör av de fyra rören. Använd en järnsåg till detta.

Steg 7

När man har kortat av rören måste man avgrada sågkanterna så att inga personskador
uppstår p.g.a. vasskantade rör. Använd entingen en vanlig avgradare, eller en järnfil.

Steg 8

Nu sätter man ihop inner- och ytterröret igen och monterar **fotplattan** på önskad höjd.

Sammanfattning av möjliga inställningslängder för **fotplatta** till **madita.**, **madita-**
fun. & **sofie.** i standard-, enkelkortad och minsta längd:

	Standardlängd	enkelkortad längd	minsta längd
Stl 0	20 - 25 cm	17 - 22 cm	14 - 19 cm
Stl 1	24 - 32 cm	20 - 28 cm	16 - 24 cm
Stl 1b	32 - 40 cm	28 - 36 cm	24 - 32 cm
Stl 2	32 - 49 cm	26 - 43 cm	20 - 37 cm