

Rekonditioneringsanvisning

Dynamic Pacer



medemagruppen

Ver. 2021-05-11

	Beskrivning	Utfört datum	Sign
1	Rengöring kan ske med desinfektionsdukar eller en desinfektionslösning med upp till 10 % blekmedel. Använd inte alltför mycket vatten. Remmarna med metallöglor eller kardborrbanden kan tvättas. Ej strykning! Avlägsna smuts och sand med litet vatten när Dynamic Pacer har använts utomhus.		
2	Använd inga aggressiva rengöringsmedel, t.ex. lösningsmedel, ej heller hårda borstar etc.		
3	Gåstolen (underrede och övre ram) kan tvättas i en autoklav/desinfektor i 60° C under max 7 minuter.		
4	Klädsel och vadderade delar tvättas fördelaktigen i 40 grader, men kan vid behov tvättas i 60 grader.		
5	Reparera eventuella lackskador och sprickor.		
6	Kontrollera/justera samtliga bromsar. Parkeringsbroms, släpbroms, backspärr, riktningsspärr.		
7	Kontrollera gasfjädern och byt ut vid behov.		
8	Kontrollera hjul och däck. Runt hjulen samlas mycket damm, smuts osv.		
9	Smörj alla rörliga delar		
10	Kontrollera alla skruvar och dra åt vid behov		
11	Gör en visuell kontroll och kontrollera gåstolen avseende sprickor, brott, felande delar och felfunktioner.		
12	Kontrollera att produkten rullar rakt.		
13	Tillbehör: Kontrollera slitage, funktion och montering. Vi rekommenderar att alla tillbehör monteras enligt våra monteringsanvisningar		
14	Se till att bruksanvisning medföljer om den levereras ut till ny användare.		
	Om ni behöver beställa reservdelar vänder ni er till Minicrosser AB och uppger produktens serienummer.		
	Utfört av:		
	Datum:		

För ytterligare underhåll och service se produktens bruksanvisning.