

Rekonditioneringsanvisning

Marcy

Ver. 2021-05-11



	Beskrivning	Utfört datum	Sign
1	Alla ramdelar och ytor kan rengöras med svampen eller fuktig trasa tillsammans med vanliga antibakteriella rengöringsmedel..		
2	Rollatorn kan rengöras i en autoklav/desinfektor (60° C, 7 minuter) Klädsel och vadderade delar tvättas fördelaktigen i 40 grader, men kan vid behov tvättas i 60 grader.		
3	Reparera eventuella lackskador och sprickor		
4	Kontrollera/justera bromsar		
5	Kontrollera hjul och däck		
6	Smörj alla rörliga delar		
7	Kontrollera alla skruvar och dra åt vid behov		
8	Inspektera rollatorn och kontrollera om det saknas delar eller om något inte fungerar som det ska		
9	Tillbehör: Kontrollera slitage, funktion och montering. Vi rekommenderar att alla tillbehör monteras enligt våra monteringsanvisningar		
10	Se till att produktens bruksanvisning finns		
	Om ni behöver beställa reservdelar vänder ni er till Minicrosser AB och uppger rollatorns serienummer.		
	Utfört av:		
	Datum:		

För ytterligare underhåll och service se produktens bruksanvisning.