



medemagruppen

Storleksguide

Dynamic Pacer

Illustrationen till höger kan du använda som riktlinje när du väljer storlek på Dynamic Pacer.
(A) Armbågshöjd, (D) Övre ramhöjd, (F) Axillmått, (G) Grenmått.

Bilden visar vart den övre ramen bör hamna för att få optimal rörelsefrihet. Detta är såklart individuellt beroende på kroppsliga behov.

Tillbehör som bröststöd, underarmstöd m.fl är justerbara i höjd ca 12 cm.

Vi rekommenderar att man utgår ifrån mått (A) Armbågshöjd.

Armbågshöjd (A), mätt:

Från: Fotsula

Till: Armbåge

Axillmått (F), mätt:


Från: Golv till övre ram och bröststöd i lägsta höjd

Till: Övre ram och bröststödet i högsta höjd

Grenmått (G), mätt:

Från: Golv till ovasida MPS (övre ram och MPS i lägsta läge)

Till: Golv till ovasida MPS (övre ram och MPS i högsta läge)

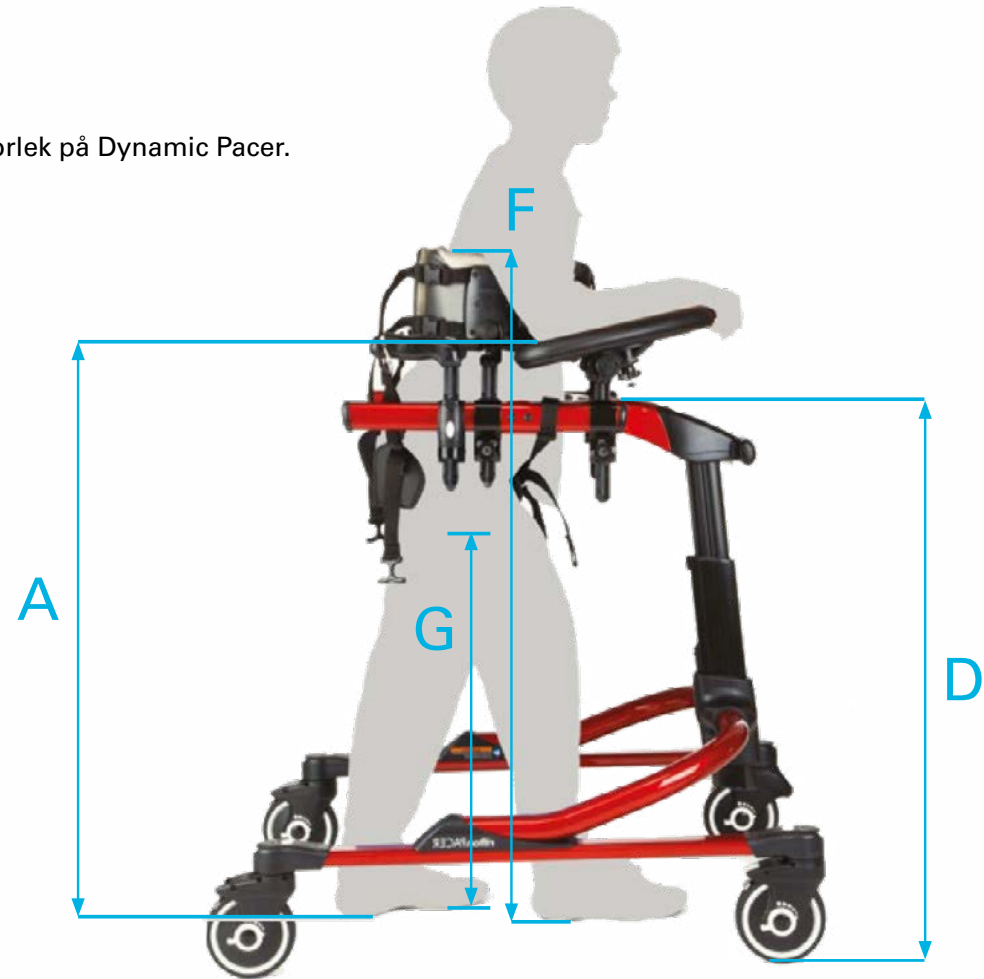

		Mini	S	M	L	XL	
A	Armbågshöjd (mätt upp till armbågen)	39 – 52 cm	47 – 70 cm	61 - 89 cm	81 - 119 cm	86 - 124 cm	
D	Övre ramhöjd	Underrede standard/kombi	32 cm	41 – 53 cm	55 - 69 cm	72 - 98 cm	79 - 104 cm
F	Axillmått:	Mätt med passande (bröststöd) för storleken	46 - 58 cm (S)	54 - 79 cm (S)	73 - 100 cm (M)	95 - 130 cm (L)	
G	Grenmått: Om du ska ha MPS (från fot till gren)		25,5 - 51 cm löper ca 13 cm	23 - 58 cm löper ca 19 cm	41 - 87 cm löper ca 22 cm		
OBS! Tänk på att ta en större storlek på ram om MPS:en kommer för högt upp gentemot den övre ramen. Det får ej bli någon risk att falla över.							

För fullständig tekniskdata se ordreguide.