

# Rekonditioneringsanvisning

## MC1124 / MC1144



medemagruppen

Minicrosser AB - Bultgatan 16 - 442 40 Kungälv - 0303-24 52 00 - [order@minicrosser.se](mailto:order@minicrosser.se) - [www.medema.com](http://www.medema.com)

Serienummer	Typ	Datum	Driftid
	<b>KONTROLLERA</b>	<b>OK?</b>	<b>JUSTERING / ANMÄRKNING</b>
1	Motor: Kontrollera motorkol/byt. Kontrollera lager för glapp/smuts		
2	Utväxling: Växellådan kontrolleras för oljeläckage och smuts. Fyll på vid behov		
3	Bromsar: Kontrollera att magnetbromsen bromsar tillräckligt och att den löser ut vid körning.		
4	Batterier: Batterierna belastningstestas ev. bytes. Kopplingar och batteripoler rengörs.		
5	Laddare: Kontrollera att laddaren ger riktig laddspänning/ström.		
6	Hjul: Ta bort smuts/hår från hjulaxlar. Kontrollera däckslitage. Kontrollera lufttryck.		
7	Lager: Alla hjullage och lager i framhjul-/länkhjulsgafflar kontrolleras för glapp och smuts. Smörj ev. skifta. Kontrollera att lagerhus inte sitter löst.		
8	Elektronik/styrbox: Funktionstestas. In och utgångar på elektroniken kontrolleras efter spår av varmgång och glapp.		
9	Tillbehör: Funktionstestas elektriskt och manuellt. Kontrollera alla reglage. Felande fingerskruvar och fästen skall ersättas. Defekta delar bytes.		
10	Kablar/kontakter: Kontrollera samtliga kablar för skador. Stripa upp lösa kablar. Kontrollera alla kontakter. Byt defekta glödlampor och säkringar. Kontrollera laddkontakt och ladduttag efter varmgång. Kontrollera alla brytarfunktioner.		
11	Chassit: Kontrollera för ev. skador. Defekta delar bytes.		
12	Ram: Kontrollera efter sprickbildningar och bråttanvisningar. Avlägsna rost, måla med grund och lackfärg. Defekta delar skall bytas, inte svetsas.		
13	Sitslyft/tilt:Funktionstestas. Kontrollera för sprickor. Smörj glidytor i lyften.		
14	Rengörning: Torka av rullstolen med fuktig trasa.		
15	Rengörning: Användning av ytdesinfektionsmedel är tillåtet.		
16	OBS! Använd aldrig upplösningsmedel som Terpentin, Cellulosa förtunnare eller liknande till att rengöra el-rullstolen. Vi godkänner rengöringsmedel från 7 upp till max 12 på pH-skalan (koncentrerat).		
17	Provkörning: Alla funktioner provas i sina ytterlägen. Provkör rullstolen med max.belastning.		
18	Övriga kommentarer:		
	* Information om underhåll och normal skötsel, se bruksanvisning.		