



medemagruppen

### Armstödet höjd & bredd

Öppna dragkedjan bak på ryggen. Lossa insexskruvarna, därefter kan armstödet skjutas upp och ner efter behov. Bredden kan nu även justeras 25 mm ut per sida.

### Armstödet vinkel

Med hjälp av justerskruven på armstödet kan man ändra vinkeln ungefär 60°. Armstödet kan fällas upp helt för enklare förflyttning.

### Höja & sänka styret

Styret kan justeras i höjd, upp/ner. Ta först bort gummihatten framtill, lossa insexskruven. Justera höjden, dra åt skruven igen.

### Styrets vinkel

Styret justeras framåt/bakåt med hjälp av handtaget. Dra handtaget neråt och dra styret närmare dig för bästa körställning.

### Sätet framåt/bakåt

Dra handtaget uppåt för att frikoppla sätet från glidskenan, därefter kan sätet flyttas framåt/bakåt. När man släpper handtaget spärras sätet automatiskt vid närmaste stopp.

### Sättesrotation

Dra tillbaka handtaget för att vrida sätet. Sätet kan vridas åt respektive sida med stopp vid varje 45°.

### Sitthöjd upp/ner

Lyft av sätet. Skruva loss spärrskruven, justera in sättestolpen till önskat läge och spänn skruven och därefter spärrmuttern.

### Nackstödet höjd

Tryck in knappen på sätet så kan nackstödet höjas eller sänkas efter behov.


Nackstödet kan även lutas framåt eller bakåt.

### Nackstödet vinkel

Nackstödet kan även lutas framåt eller bakåt.

### Ryggstöd & sitsdjup

Lossa skruvarna på båda sidor nedtill. Nu kan sitsdjupet justeras genom att man skjuter sätesryggen framåt eller bakåt.

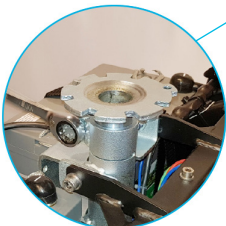

## Rätt inställningar skapar rätt förutsättningar

Mini Crosser erbjuder ett avancerat sittande. En bra sittställning är viktigt för att kunna köra sin scooter tryggt och säkert. Vi visar här de vanligaste justeringarna för att anpassa scootern efter brukaren.

