

Ankelfixering Stealth på Spinalus-3

Art nr: 2012-1455/-1456/-1457/-1458/-1459

Ankelfixering remmar
Mått omkrets under ankel.

| | |
|----|------------|
| XS | 14-17 cm |
| S | 16,5-20 cm |
| M | 19-23,5 cm |
| L | 23-28 cm |
| XL | 26,5-33 cm |



Ankelfixering sæt



Fotplattorna på Spinalus-3 är förbereda för fotledsfixering, med två slitsar på varje sida.



Börja med att montera spännfästena på remmarna.



För remmen ner i det inre spåret och upp i det yttre spåret.




För remmen genom spännen.
Gör samma sak på andra sidan och ankelfixeringen är klar att användas.




2433-2105


Delade benstöd

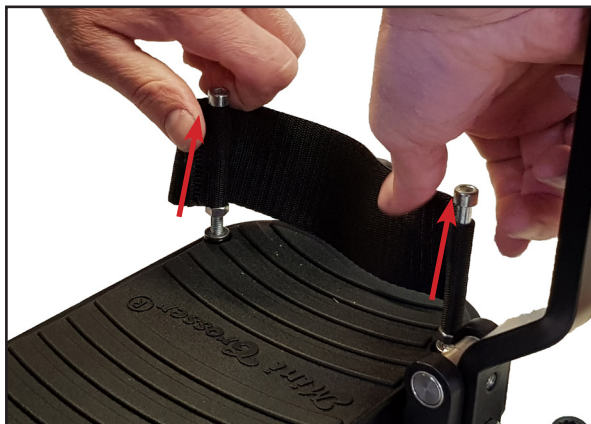


Justerbart monterings-kit

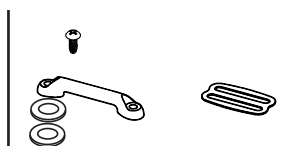

- 4 stk. M5x25 BH A2
- 8 stk. M5 Brickor
- 4 stk. M5 Rip lock
- 4 stk. M5 Låsmutter

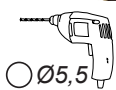

M5x25 BH A2
M5 Brickor

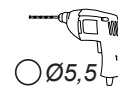

M5 Rip lock
M5 Låsmutter



Ankelfixering remmar
Mått omkrets under ankel.



| | |
|----|------------|
| XS | 14-17 cm |
| S | 16,5-20 cm |
| M | 19-23,5 cm |
| L | 23-28 cm |
| XL | 26,5-33 cm |

