


Byte av framvagn samt framhjulsinställning

Art.nr.: 1502-1253 Rep kit X-model std. 4W, komplett
1502-1254 Rep kit X-model HD 4W, komplett




Byte av framvagn

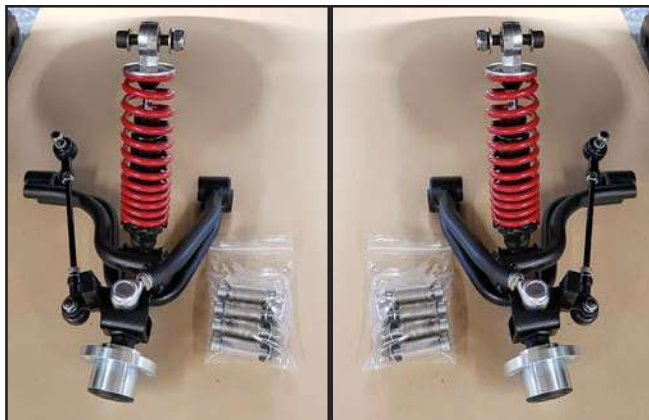

Framvagnsset.



Lyft upp framändan av Mini Crossern och montera av hjulen.

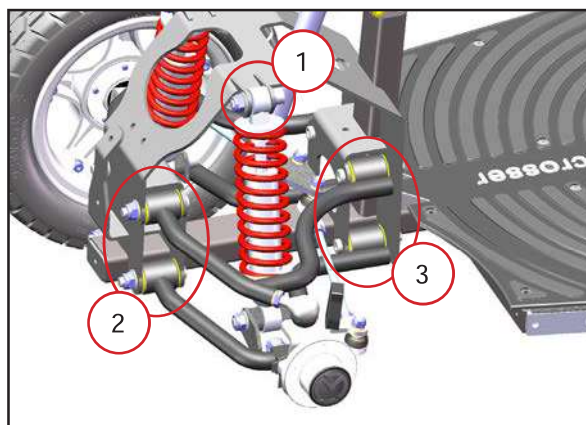

Demontera framvagnsdelarna.




Börja med att skruva loss övre bulten till fjädringen, Pos1.
Verktyg: Fast nyckel 17mm och Insexnyckel.




Montera ner framvagnsdelarna genom att lossa bultarna i Pos 1 och 2(tidigare bild).

Montering av framvagn

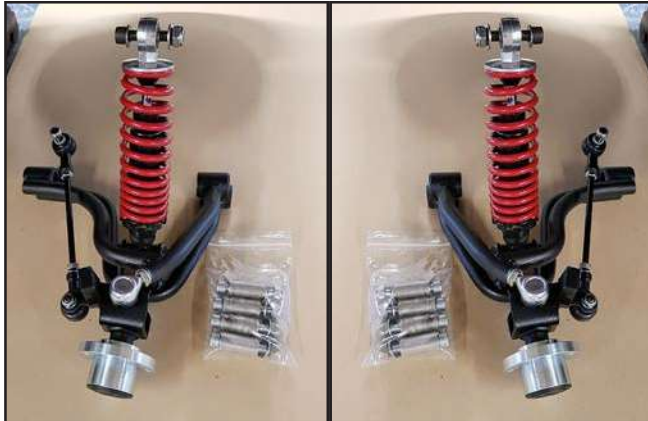


Nytt framvagnsset.

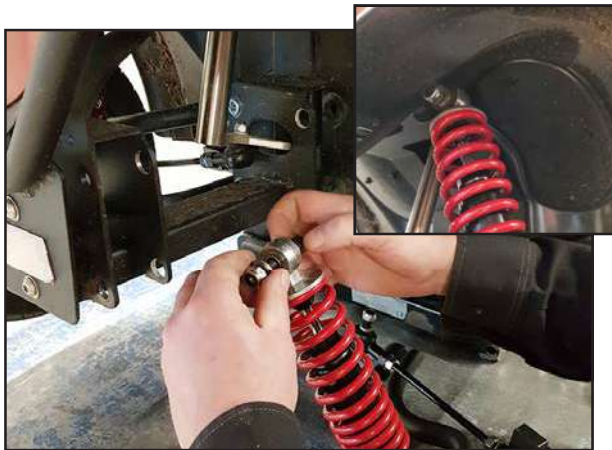


Tag bort skruv och mutter från toppen av fjäder för att montera framvagn.
Samtliga muttrar dras med moment efter montering.



Demontera skruvförbandet från hylsa.

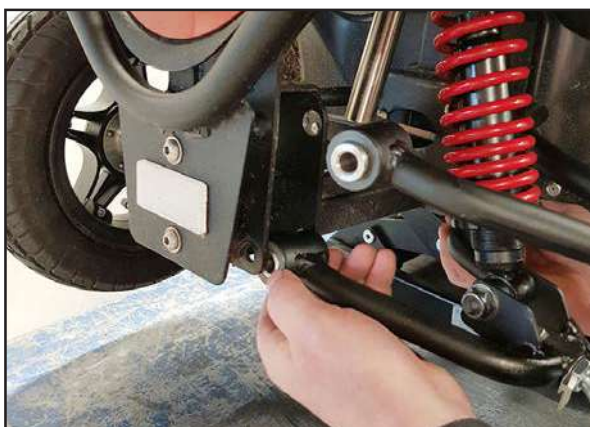

Montera framvagnsdelarna och sätt dem på plats.
Vektyg: Momentnyckel 17mm, Insexnyckel 8mm.

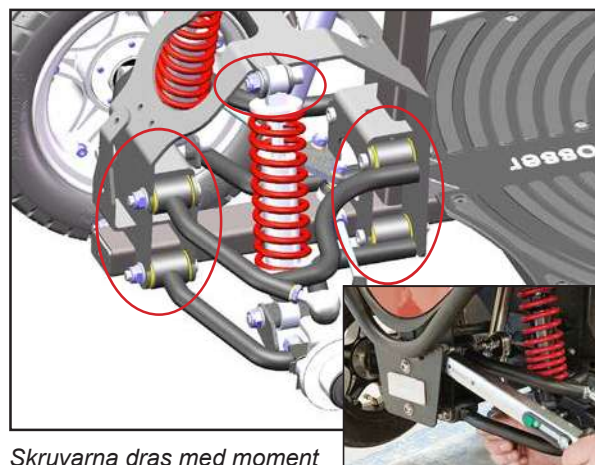

Skruvarna dras med moment 47Nm.
Samma monteringsanvisning gäller även andra sidan.

Framhjulsinställning



Art nr: 8035-1098 Verktøy for framhjulsinställning till X-Modell 4W. Verktøyet kan beställas från Medema.




Vid framvagnsinställning krävs:


- Fasta nycklar i storlekarna: 12, 13, 14 och 17mm.
- Hammare.
- Spårmejsel.
- Insexnyckel 8mm.
- Öppen momentnyckel 13mm
- Domkraft och Klossar.



Minicrossern skall stå på en helt plan yta.
Använd vinkelhake för att kontrollera att hjulen står i lod.

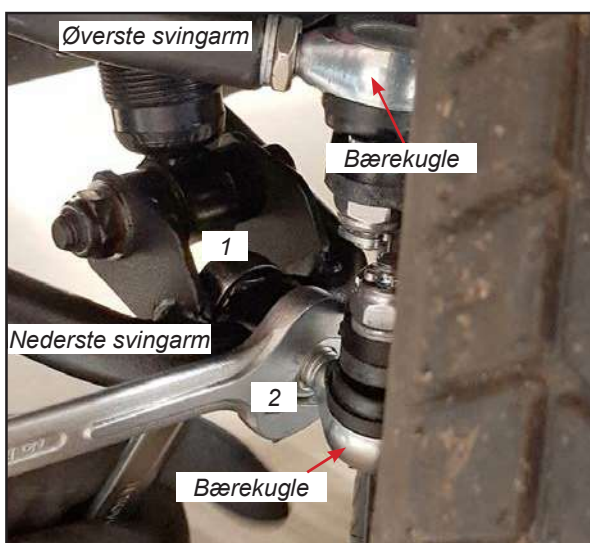

När hjulet justeras är det viktigt att kullleden står plant med länkarmen.
Detta gäller både den övre och undre kullleden. Visuell kontroll. Justera pos. 1 och 2 tills hjulet står i lod.

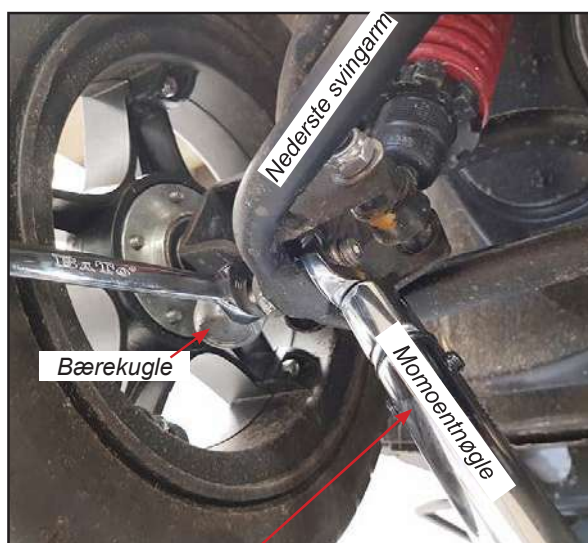

Dra åt med moment 56Nm.



Justera och kontrollera med vinkelhaken så att hjulen står i lod.



När allt är justerat knackas låsbleckets ena kant mot muttern och andra kanten helt mot länkarmens undersida.

Verktyg: Spårmejsel och hammare.



Placera styrriktningssmallen på golvmattan vik ner styret så båda hantagen går mot styrriktningssmallen lika på båda sidor.





Placera justeringsmallen.



Justeringsmallen är utrustad och fästes med magneter. När den fästes under ramen är det viktigt att den böckade kanten följer ramen.



Justeringsmallen har rätt vinkel från början.
Hjulen justeras parallellt med mallen så att det är samma mått i fram och bakkant av fälgen (se bilder).
OBS: Måtten mellan mallen och fälgen kan skilja mellan sidorna.

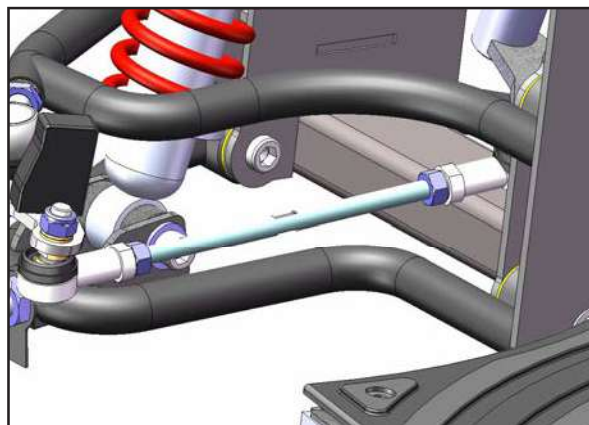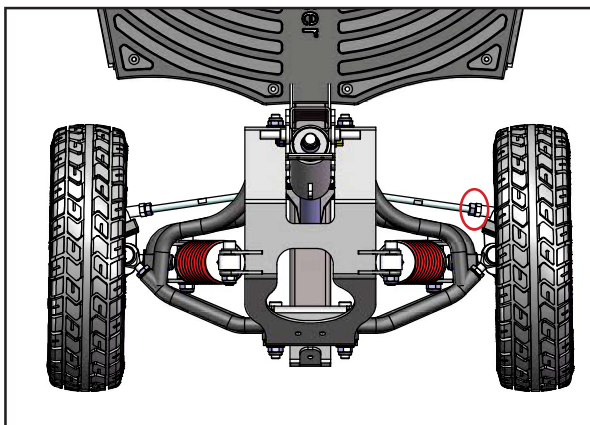

Justera hjulets vinkel genom att lossa på muttrarna i båda ändor på styrstången.
Justera styrstången så hjulet står i rätt vinkel efter mallen.



Efterkontrollera och drag åt muttrarna.



Efter justering tag bort justeringsmallen genom att pressa det neråt så att magneten släpper.

Kontroll och byte av gummibussningar till stötdämparen.



Rep kit X-model std. komplett



Rep kit X-model HD 4W komplett

Kontroll



För kontroll av bussning, Demontera stötdämparens nedre fäste.



Placera lyft eller liknande under scootern så den står stabilt under demontering.



Tag av mutterkåporna och lossa muttrar och brickor på båda sidor.



Tryck ut gängstången och vinkla ut fjädern för att kontrollera gummibussningen



Om bussningen är ljus och genomskinlig är det rätt bussning. återmontera fjädringen.



Dras åt med moment 47Nm



Är bussningen svart, skall den bytas både i övre och undre fästet.



För att lättare komma åt, lyft av sätet.



Montera av kåpan.



Lösa bakkåpan och eventuella tillbehör.




Lägg bakkåpan på bakplattan.



Demontera skruven till det övre fästet.



Pressa ur bussningen ur fästet.

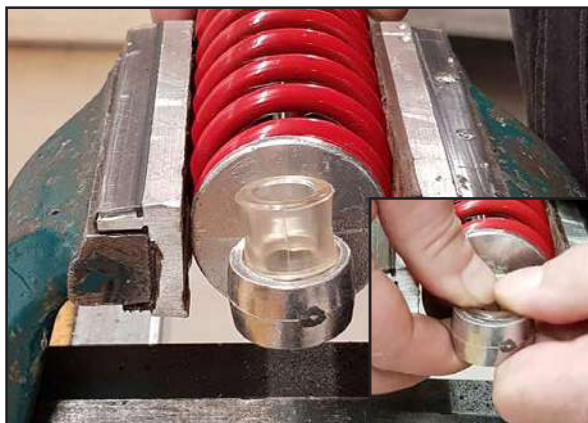

Pressa i den nya bussningen.



Återmontera stålbusningen och dom svarta distanserna.



När fjädern varit helt av monterad så monteras den lättast först i övre fästet, sedan i det nedre. Använd nya brickor och muttrar.
Dras åt med moment 47Nm.



Återmontera bakskärm och eventuella tillbehör samt batterikåpa och säte.





medemagruppen